

Stephan Blankenburg  
Blankenburg Medical  
Telefon direkt: 0521 430 60 8-11  
Telefon Zentrale: 0521 430 60 8-0  
Fax-Nr. 0521 41 75 177  
Mail: sb@blankenburg-medical.de  
Carl-Benz-Str.4  
D-33803 Steinhagen

02.11.2021

## Wirksamkeit von VERIFORTE® med Mundspüllösung bei kariogenen, gingival- und parodontal-pathogenen Bakterien

VERIFORTE® med Mundspüllösung besitzt ein breites Wirkungsspektrum gegen viele Arten von Mikroorganismen. Durch mechanische Spülung der kontaminierten Mundhöhle mit VERIFORTE® med Mundspüllösung wird das Wachstum von grampositiven und gramnegativen Bakterien (einschließlich MRSA), Viren, Pilzen und Sporen gehemmt.

Der in VERIFORTE® med Mundspüllösung enthaltene Konservierungsstoff hypochlorige Säure (HOCl) zeigt eine hervorragende bakterizide Wirkung gegen die in EN 13727 (Suspensionsversuch zur Bestimmung der bakteriziden Wirkung im humanmedizinischen Bereich) festgelegten bakteriellen Bezugsstämme. Da es sich hierbei um „übergeordnete“ und nach Europäischen Normen festgelegte Prüfkeime handelt, kann daraus eine Wirksamkeit gegen die folgenden kariogenen, gingival- und parodontal-pathogenen Bakterienstämme konkludiert werden:

- Aggregatibacter actinomycetemcomitans
- Porphyromonas gingivalis
- Prevotella intermedia
- Tannerella forsythia
- Treponema denticola
- Fusobacterium nucleatum
- Streptococcus mutans
- Streptococcus sobrinus

Da es sich bei VERIFORTE® med Mundspüllösung um ein CE-gekennzeichnetes und registriertes Medizinprodukt der Klasse IIa, und nicht um ein Biozidprodukt nach BPR handelt, steht bei der Anwendung dieses Produkts die mechanische Spülung im Vordergrund. Keime werden auf rein physikalischem Weg, mittels Osmolyse, eliminiert. In zahlreichen Biokompatibilitätstests wurde die ausgezeichnete Verträglichkeit von VERIFORTE® med belegt. VERIFORTE® med Mundspüllösung ist nicht zytotoxisch und kann auch auf freiliegenden Knochen oder Knorpeln angewendet werden. Es sind bislang keine Nebenwirkungen oder Kontraindikationen für VERIFORTE® med Mundspüllösung bekannt.

---

Vor Gebrauch unserer Produkte stets Kennzeichnung und Anwendungsbeschreibung lesen / read label and instruction before use

Es gelten unsere AGB, abrufbar unter / Our general terms and conditions apply, available at:  
www.veriforte.com, Bank Austria - IBAN: AT431200051534953053 / BIC: BKAUATWW

